

Pokyny na odber vzoriek pomocou Rovers Cervex-Brush

s odnímateľnou hlavickou do vialiek SurePath

POSTUP ODBERU

1



Vložiť odberovú kefku Rovers Cervex-Brush do endocervikálneho kanála a päťkrát ju otočiť v smere hodinových ručičiek.

2



Oddeliť odnímateľnú hlavicu odberovej kefky a spustiť do nádobky (vialka) s fixačným roztokom (do väčšieho otvoru vo vialke).

3



Uzavrieť vialku, označiť a poslať do laboratória na spracovanie.

Uchovávanie vialiek:
pri izbovej teplote

Kontraindikácie odberu:
Cervex-Brush by sa nemal používať u tehotných pacientok po prekročení 10. týždňa tehotenstva.

Manažment pacienta pri Liquid base cytology (LBC)

